


PM-CARE® INSERT-KIT

SET DE POSE DE STÉRILET

15

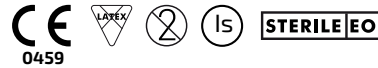

PINCE DE CHÉRON

PINCE DE POZZI
DROITECISEAUX COUPE
FIL DISTAL

HYSTÉROMÈTRE

Le set de pose de stérilet **PM-CARE® INSERT-KIT** permet de poser un dispositif intra-utérin dans la cavité intra-utérine. Il est composé d'une pince de Pozzi, d'une pince de Chéron, d'une paire de ciseaux coupe-fil et d'un hystéromètre.

COMPOSITION DU SET DE POSE DE STÉRILET :

- La pince de Pozzi droite permet la préhension du col utérin et la réalisation d'une "traction-fixation" sur le col utérin afin de permettre d'ajuster l'angle de flexion de l'utérus à 180°. Cette correction de l'angle de flexion est nécessaire lors de l'introduction d'instruments et de la pose du dispositif intra-utérin sans prendre le risque de perforer l'utérus.
- La pince de Chéron coudée permet de nettoyer l'utérus et la zone de travail.
- Les ciseaux coupe-fil latéral ou distal permettent de couper les fils du dispositif intra-utérin. Le choix de l'utilisation d'une paire de ciseaux coupe-fil latéral ou distal reste celui du praticien en fonction de sa préférence et de son aisance dans l'acte à pratiquer.
- L'hystéromètre permet d'apprécier la profondeur de la cavité utérine.

RÉFÉRENCE(S) DISPONIBLE(S)

Référence	PINCE DE POZZI Modèle	PINCE DE CHÉRON Modèle	CISEAUX COUPE-FIL Modèle	HYSTÉROMÈTRE Diamètre (Fr)
PS4190000	Droite	Coudée	Distal	(non fourni)
PS3840000	Droite	Coudée	Distal	14
PS3230000	Droite	Coudée	Latéral	14

INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL

Date de 1 ^{ère} mise sur le marché	2011
Usage unique	Oui
Classe	Is
Stérile	Oui
Mode de stérilisation	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
Présence de latex	Non
Durée de vie	5 ans
Certification	CE
Conditionnement	Boîte de 10 unités en emballage individuel stérile
Stockage	Dans sa boîte d'origine dans un endroit frais et sec

PRINCE MEDICAL SAS

ZA La Sente Du Moulin

64 rue Gutenberg - 60530 Ercuis - France

www.prince-medical.com

Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76

prince-medical@omerin.com

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.

® Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.

PRINCE MEDICAL
DEVICES